

Gracias por elegir Juzo, líder internacional en productos de compresión desde 1912.

Fabricado con cuidado y atención en los detalles, el vendaje de compresión Juzo cuenta con diversas características que proporcionan terapia, confort, versatilidad y ajuste superior, como por ejemplo:

- **Presión de trabajo:** elasticidad reducida para una alta presión de trabajo.
- **Lengüeta (E-Z Pull Tab):** ayuda a lograr una aplicación sin inconvenientes.
- **Reversible:** se puede usar del lado beige o negro.

El paquete incluye lo siguiente:

- Vendaje de compresión Juzo
- Ganchos sujetadores Juzo

Cuidado y mantenimiento

- Retire todos los ganchos sujetadores con forma de semicírculo de las tiras.
- Lave a máquina con agua tibia.
- Se recomienda usar una funda para ropa.
- Seque a máquina a baja temperatura.
- NO USE: lavandina, cloro, suavizante para ropa ni otros aditivos de lavandería.
- Guarde las prendas en un lugar seco a temperatura ambiente.

Política de devolución

En caso de que sea necesario devolver la prenda para su evaluación, Juzo exige que esta se lave (por motivos de higiene) antes de su devolución al lugar de compra original.

Tela

48% Nylon / 46% Polyurethane / 6% Spandex - Sin látex de caucho natural

Instrucciones de uso

Se recomienda consultar con su médico y responsable de realizar los ajustes para conocer las indicaciones apropiadas sobre el uso y la aplicación de este producto. Si experimenta algún tipo de molestia, retire el vendaje de compresión de elasticidad reducida de inmediato y consulte con su médico.

- El vendaje de compresión Juzo está diseñado para ser reversible. Los ganchos en forma de semicírculo se deben sujetar a la prenda del lado opuesto al color que se va a usar.

Indicaciones

Várices primarias y secundarias, insuficiencia venosa crónica, síndrome postrombótico, úlceras venosas por estasis, procedimiento pre- y posvenoso, edema linfático.

Contraindicaciones

Absolutas: enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca descompensada, flebitis séptica, flegmasia cerúlea dolorosa
Relativas: Infección en la pierna, intolerancia a la compresión o al material de la prenda, trastorno sensorial en el miembro.

Precauciones

Actualmente, no se conocen efectos secundarios. Sin embargo, si se produjeran resultados negativos (como irritación cutánea) debido al uso de nuestros productos, suspenda el uso de la prenda y consulte con su médico. El fabricante no es responsable por daños / lesiones causados por el uso indebido o el manejo incorrecto.

Pasos para colocar el vendaje para rodilla

1. Antes de colocar el vendaje para rodilla, debe tener el segmento de vendaje para pantorrilla en la pierna.
2. Sujete los ganchos a las tiras del lado opuesto al color que se va a usar. Por ejemplo, si el color elegido es el beige, entonces los ganchos se deben colocar del lado negro de la prenda.
3. Sentado, extienda la pierna y coloque el vendaje en la rodilla de forma tal que la costura horizontal se alinee con la flexión en la parte posterior de la rodilla.
4. Ajuste la tira superior del vendaje jalando de la tira superior y la lengüeta superior simultáneamente en sentido contrario del lado opuesto de la prenda. La tira debe estar lo suficientemente ajustada para ceñir con suavidad la pierna y mantener la prenda en su lugar.
5. Una vez que la tira esté en su lugar, jale de la tira inferior de la rodilla y de la lengüeta simultáneamente en el lado opuesto de la prenda.
6. Una vez que el vendaje para rodilla esté ubicado en la pierna, nuevamente jale de la tira superior junto con la lengüeta hasta que se adapte cómodamente. Cuando jale de la tira, hágalo suavemente hacia abajo en dirección al centro de la rodilla.
7. Repita este paso con la tira inferior, solo que esta vez jale de la tira inferior hacia arriba en dirección al centro de la rodilla. La tira se debe ajustar hasta que se adapte cómodamente.
8. El vendaje debe tener un ajuste ceñido pero no provocar dolor. Si siente algún tipo de dolor o molestia, o si el vendaje está demasiado flojo, repita los pasos 6 a 7, ajustando el nivel de tensión que se aplica.

Nota: Consulte las instrucciones de cuidado y aplicación para el uso del segmento de vendaje de compresión Juzo para pie y pantorrilla.
Sujetadores adicionales se proporcionan dentro del empaque.

Merci de choisir Juzo, un chef de file international dans les vêtements de compression médicaux depuis 1912.

Fabriqu  avec soin et le souci du d tail, votre Bandage Compressif Juzo poss de plusieurs caract ristiques qui offrent th rapie, confort, versatilit  et ajustement sup rieur, notamment

- **Pression de travail** - Extensibilit  courte pour une haute pression de travail.
- **Tirette EZ** – Aide pour une application sans probl me.
- **R versible** - Port  soit en beige ou en noir

Inclus dans ce paquet :

- Bandage compressif Juzo
- Fermetures   crochets Juzo

Soin et entretien

- Enlever toutes les fermetures   crochets en demi-cercle des sangles
- Laver   la machine   l'eau ti de
- Un sac de v tements est fortement recommand 
- S chage par culbutage   basse temp rature
- NE PAS UTILISER : agent de blanchiment, chlore, assouplissants, ou autres additifs de blanchisserie
- Entreposer les v tements dans un endroit sec   temp rature ambiante

Politique de retour

S'il s'av re n cessaire de retourner votre v tement pour une inspection, Juzo vous demande de bien le laver (pour des raisons hygi niques) avant de le retourner au lieu d'achat d'origine.

Tissu - 48% Nylon / 46% Polyurethane / 6% Spandex. Pas fait de latex en caoutchouc naturel.

Mode d'emploi

Il est recommand  de consulter un professionnel de la sant  et essayeur pour les bonnes directives sur l'utilisation et l'application de ce produit. Si vous ressentez une g ne quelconque, enlevez imm diatement le bandage compressif   extensibilit  courte et consultez votre professionnel de la sant .

- Le Bandage compressif Juzo est con u pour  tre r versible. Les fermetures   crochets en demi-cercle doivent  tre attach es au v tement sur le c t  oppos  de la couleur    tre port e.

Indications

Varices primaires et secondaires, insuffisance veineuse chronique, syndrome post-thrombotique, ulc res de stase veineuse, pr  et post proc dure veineuse et  d me lymphatique.

Contre-indications

Absolue : maladie art rielle p riph rique, cardiopathies d compens es, phl bite septique, phelgmasia cerulea dolens.

Relative : Infection de la jambe, intol rance   la compression ou aux tissus de v tement, trouble sensoriel du membre.

Mises en garde

Aucun effet secondaire n'est actuellement connu. Toutefois, si un r sultat n gatif se produirait (c.- -d. des irritations de la peau) suite   l'utilisation de nos produits, veuillez cesser l'utilisation du v tement et consultez un professionnel de la sant . Le fabricant n'est pas responsable des dommages /blessures qui ont  t  caus es par une manipulation incorrecte ou une mauvaise utilisation.

 tapes pour mettre le Bandage pour le genou

1. Avant d'appliquer le bandage pour le genou, vous devriez avoir le segment de bandage pour le mollet sur votre jambe.
2. Attachez les fermetures   crochets aux sangles sur le c t  oppos  de la couleur    tre port e. Par exemple, si beige est la couleur d sir e, alors les fermetures doivent  tre appliqu es au c t  noir du v tement.
3. En vous asseyant,  tendez votre jambe et positionnez le bandage sur votre genou afin que la couture horizontale s'aligne avec le pli   l'arri re de votre genou.
4. Attachez bien la sangle sup rieure du bandage en contre-tirant la sangle sup rieure et la tirette EZ sup rieure sur le c t  oppos  du v tement en m me temps. La sangle doit  tre juste suffisamment serr e pour envelopper d licatement la jambe et tenir le v tement en place.
5. Une fois que la sangle sup rieure est en place, tirez la sangle inf rieure du genou et   l'unisson tirez la tirette EZ sur le c t  oppos  du v tement.
6. Une fois que le bandage pour le genou est positionn  sur votre jambe, tirez   nouveau la sangle sup rieure avec la tirette EZ jusqu'  ce qu'elle soit confortablement ajust e. Lorsque vous tirez la sangle, tirez l g rement vers le bas vers le centre du genou.
7. R p tez cette  tape avec la sangle inf rieure, seulement cette fois, tirez la sangle inf rieure vers le haut vers le centre du genou. La sangle doit  tre serr e jusqu'  ce qu'elle soit confortablement ajust e.
8. Le bandage devrait  tre bien ajust  mais pas douloureusement serr . Si vous ressentez de la douleur ou une g ne ou si le bandage semble trop d tendu, alors r p tez les  tapes 6   7, en ajustant le niveau de tension qui est appliqu .

Remarque : Consultez les directives concernant le soin et l'application pour l'utilisation d'un Segment de mollet et pied de Bandage compressif Juzo.
Les fixations suppl mentaires sont fournies   l'int rieur de l'emballage.